

Таблица пересчета

Руководство по подбору контактных линз

Таблица пересчета оптической силы очковых линз в оптическую силу контактных линз (вертексная дистанция 12 мм)		
Коррекция в очках	+	-
4.00	4.25	3.87
4.50	4.75	4.25
5.00	5.25	4.75
5.50	5.87	5.12
6.00	6.50	5.62
6.50	7.00	6.00
7.00	7.62	6.50
7.50	8.25	6.87
8.00	8.87	7.25
8.50	9.50	7.75
9.00	10.12	8.12
9.50	10.75	8.50
10.00	11.37	8.87
10.50	12.00	9.37
11.00	12.75	9.72
11.50	13.37	10.12
12.00	14.00	10.50
12.50	14.75	10.87
13.00	15.50	11.25
13.50	16.12	11.62
14.00	16.75	12.00
14.50	17.50	12.37
15.00	18.25	12.75
15.50	19.00	13.00
16.00	19.75	13.50
16.50	20.50	13.75
17.00	21.50	14.12
17.50	22.25	14.50
18.00	23.00	14.75
18.50	23.75	15.12
19.00	24.75	15.50
19.50	25.50	15.81
20.00	26.12	16.11

Пересчет диоптрийности в радиус кривизны роговицы	
47.75 D	= 7.07 мм
47.50 D	= 7.11 мм
47.25 D	= 7.14 мм
47.00 D	= 7.18 мм
46.75 D	= 7.22 мм
46.50 D	= 7.26 мм
46.25 D	= 7.30 мм
46.00 D	= 7.34 мм
45.75 D	= 7.38 мм
45.50 D	= 7.42 мм
45.25 D	= 7.46 мм
45.00 D	= 7.50 мм
44.75 D	= 7.55 мм
44.50 D	= 7.59 мм
44.25 D	= 7.63 мм
44.00 D	= 7.67 мм
43.75 D	= 7.72 мм
43.50 D	= 7.76 мм
43.25 D	= 7.80 мм
43.00 D	= 7.85 мм
42.75 D	= 7.90 мм
42.50 D	= 7.95 мм
42.25 D	= 8.00 мм
42.00 D	= 8.04 мм
41.75 D	= 8.08 мм
41.50 D	= 8.13 мм
41.25 D	= 8.18 мм
41.00 D	= 8.23 мм
40.75 D	= 8.28 мм
40.50 D	= 8.33 мм
40.25 D	= 8.39 мм
40.00 D	= 8.44 мм