



1. РАССЧИТАЙТЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТНОЙ ЛИНЗЫ

- Определите оптимальную очковую коррекцию
- Определите необходимые параметры DAILIES® AquaComfort® Plus Астигматизм, используя таблицу пересчета на странице справа

2. ОЦЕНИТЕ ПОСАДКУ КОНТАКТНОЙ ЛИНЗЫ

- Наденьте контактные линзы и дайте время на адаптацию
- Оцените посадку линзы. Признаки оптимальной посадки:
 - Центровка контактной линзы: линза полностью покрывает роговицу, центр линзы практически совпадает с центром зрачка.
 - Смещение линзы при моргании: оптимальное смещение – 0,2–0,5 мм.
 - Подвижность линзы (пуш-ап-тест): линза легко смещается и быстро возвращается в прежнее положение.

3. ОЦЕНИТЕ РОТАЦИЮ КОНТАКТНОЙ ЛИНЗЫ

- На контактной линзе DAILIES® AquaComfort® Plus Астигматизм есть 2 ориентационные метки, при надевании линзы метки располагаются горизонтально.
- Если ориентационные метки расположены на 3 и 9 часах, ротация отсутствует.
- Если метки смещены, определите величину и направление смещения. Компенсируйте смещение пересчетом оси линзы.
- Индикатор инверсии в виде букв ОК может располагаться сверху или снизу.



4. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ЗРЕНИЯ

- Оцените остроту зрения в линзах.
- При необходимости выполните сферическую овер-рефракцию.
- Если сферическая овер-рефракция не обеспечила достаточного качества зрения, выполните сфероцилиндрическую овер-рефракцию. Для коррекции параметров линзы по результатам сфероцилиндрической овер-рефракции используйте калькулятор пересчета на сайте moiglaza.ru.

ТАБЛИЦА ПЕРЕСЧЕТА ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ В ОПТИЧЕСКУЮ СИЛУ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

Таблица предназначена для выбора оптической силы контактных линз DAILIES® AquaComfort Plus® Астигматизм

(Обратите внимание, что в таблице уже учтена вертексная поправка)

1. В крайней левой колонке «Сила сферы» указана оптическая сила сферы очковой линзы.
2. В верхней строке таблицы «Сила цилиндра» указаны значения оптической силы цилиндра очковой линзы.
3. В месте пересечения вертикальных и горизонтальных колонок указана рекомендованная сила линзы DAILIES® AquaComfort® Plus Toric.
4. Ось: выберите ось DAILIES® AquaComfort® Plus Toric, максимально близкую к оси в очковой коррекции: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°.
5. При окончательном выборе линзы учитывайте необходимость перерасчета оси линзы в случае ее ротации.

СИЛА ЦИЛИНДРА В ОЧКОВОЙ ЛИНЗЕ

		-0.75		-1.00		-1.25		-1.50		-1.75		-2.00		-2.25		-2.50		
СИЛА СФЕРЫ В ОЧКОВОЙ ЛИНЗЕ	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl
	-9.00	-8.50	sph	-8.00	-0.75	-8.00	-0.75	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00
-8.75	-8.00	sph	-8.00	-0.75	-8.00	-0.75	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75
-8.50	-8.00	sph	-7.50	-0.75	-7.50	-0.75	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75
-8.25	-7.75	sph	-7.50	-0.75	-7.50	-0.75	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75
-8.00	-7.75	sph	-7.50	-0.75	-7.50	-0.75	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75
-7.75	-7.50	sph	-7.00	-0.75	-7.00	-0.75	-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75
-7.50	-7.25	sph	-7.00	-0.75	-7.00	-0.75	-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75
-7.25	-7.00	sph	-6.50	-0.75	-6.50	-0.75	-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75
-7.00	-6.75	sph	-6.50	-0.75	-6.50	-0.75	-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75
-6.75	-6.50	sph	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75
-6.50	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25
-6.25	-5.75	-0.75	-5.75	-0.75	-5.75	-0.75	-5.75	-1.25	-5.75	-1.25	-5.75	-1.75	-5.75	-1.75	-5.75	-1.75	-5.75	-1.75
-6.00	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-1.25	-5.50	-1.25	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75
-5.75	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-1.25	-5.50	-1.25	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75
-5.50	-5.25	-0.75	-5.25	-0.75	-5.25	-0.75	-5.25	-1.25	-5.25	-1.25	-5.25	-1.75	-5.25	-1.75	-5.25	-1.75	-5.25	-1.75
-5.25	-5.00	-0.75	-5.00	-0.75	-5.00	-0.75	-5.00	-1.25	-5.00	-1.25	-5.00	-1.75	-5.00	-1.75	-5.00	-1.75	-5.00	-1.75
-5.00	-4.75	-0.75	-4.75	-0.75	-4.75	-0.75	-4.75	-1.25	-4.75	-1.25	-4.75	-1.75	-4.75	-1.75	-4.75	-1.75	-4.75	-1.75
-4.75	-4.50	-0.75	-4.50	-0.75	-4.50	-0.75	-4.50	-1.25	-4.50	-1.25	-4.50	-1.75	-4.50	-1.75	-4.50	-1.75	-4.50	-1.75
-4.50	-4.25	-0.75	-4.25	-0.75	-4.25	-0.75	-4.25	-1.25	-4.25	-1.25	-4.25	-1.75	-4.25	-1.75	-4.25	-1.75	-4.25	-1.75
-4.25	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-1.25	-4.00	-1.25	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75
-4.00	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-1.25	-4.00	-1.25	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75
-3.75	-3.75	-0.75	-3.75	-0.75	-3.75	-0.75	-3.75	-1.25	-3.75	-1.25	-3.75	-1.75	-3.75	-1.75	-3.75	-1.75	-3.75	-1.75
-3.50	-3.50	-0.75	-3.50	-0.75	-3.50	-0.75	-3.50	-1.25	-3.50	-1.25	-3.50	-1.75	-3.50	-1.75	-3.50	-1.75	-3.50	-1.75
-3.25	-3.25	-0.75	-3.25	-0.75	-3.25	-0.75	-3.25	-1.25	-3.25	-1.25	-3.25	-1.75	-3.25	-1.75	-3.25	-1.75	-3.25	-1.75
-3.00	-3.00	-0.75	-3.00	-0.75	-3.00	-0.75	-3.00	-1.25	-3.00	-1.25	-3.00	-1.75	-3.00	-1.75	-3.00	-1.75	-3.00	-1.75
-2.75	-2.75	-0.75	-2.75	-0.75	-2.75	-1.25	-2.75	-1.25	-2.75	-1.25	-2.75	-1.75	-2.75	-1.75	-2.75	-1.75	-2.75	-1.75
-2.50	-2.50	-0.75	-2.50	-0.75	-2.50	-1.25	-2.50	-1.25	-2.50	-1.25	-2.50	-1.75	-2.50	-1.75	-2.50	-1.75	-2.50	-1.75
-2.25	-2.00	-0.75	-2.00	-0.75	-2.00	-1.25	-2.00	-1.25	-2.00	-1.25	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75	-2.25	-1.75
-2.00	-2.00	-0.75	-2.00	-0.75	-2.00	-1.25	-2.00	-1.25	-2.00	-1.25	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75
-1.75	-1.75	-0.75	-1.75	-0.75	-1.75	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-2.00	-1.75
-1.50	-1.50	-0.75	-1.50	-0.75	-1.50	-1.25	-1.50	-1.25	-1.50	-1.25	-1.50	-1.75	-1.50	-1.75	-1.50	-1.75	-1.50	-1.75
-1.25	-1.25	-0.75	-1.25	-0.75	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75
-1.00	-1.00	-0.75	-1.00	-0.75	-1.00	-1.25	-1.00	-1.25	-1.00	-1.25	-1.00	-1.75	-1.00	-1.75	-1.00	-1.75	-1.00	-1.75
-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-1.25	-0.75	-1.25	-0.75	-1.25	-0.75	-1.75	-0.75	-1.75	-0.75	-1.75	-0.75	-1.75
-0.50	-0.50	-0.75	-0.50	-0.75	-0.50	-1.25	-0.50	-1.25	-0.50	-1.25	-0.50	-1.75	-0.50	-1.75	-0.50	-1.75	-0.50	-1.75
-0.25	-0.25	-0.75	-0.25	-0.75	-0.25	-1.25	-0.25	-1.25	-0.25	-1.25	-0.25	-1.75	-0.25	-1.75	-0.25	-1.75	-0.25	-1.75
+0.00	+0.00	-0.75	+0.00	-0.75	+0.00	-1.25	+0.00	-1.25	+0.00	-1.25	+0.00	-1.75	+0.00	-1.75	+0.00	-1.75	+0.00	-1.75
+0.25	+0.25	-0.75	+0.25	-0.75	+0.25	-1.25	+0.25	-1.25	+0.25	-1.25	+0.25	-1.75	+0.25	-1.75	+0.25	-1.75	+0.25	-1.75
+0.50	+0.50	-0.75	+0.50	-0.75	+0.50	-1.25	+0.50	-1.25	+0.50	-1.25	+0.50	-1.75	+0.50	-1.75	+0.50	-1.75	+0.25	-1.75
+0.75	+0.75	-0.75	+0.75	-0.75	+0.75	-1.25	+0.75	-1.25	+0.75	-1.25	+0.75	-1.75	+0.75	-1.75	+0.75	-1.75	+0.50	-1.75
+1.00	+1.00	-0.75	+1.00	-0.75	+1.00	-1.25	+1.00	-1.25	+1.00	-1.25	+1.00	-1.75	+1.00	-1.75	+1.00	-1.75	+0.75	-1.75
+1.25	+1.25	-0.75	+1.25	-0.75	+1.25	-1.25	+1.25	-1.25	+1.25	-1.25	+1.25	-1.75	+1.25	-1.75	+1.25	-1.75	+1.00	-1.75
+1.50	+1.50	-0.75	+1.50	-0.75	+1.50	-1.25	+1.50	-1.25	+1.50	-1.25	+1.50	-1.75	+1.50	-1.75	+1.50	-1.75	+1.25	-1.75
+1.75	+1.75	-0.75	+1.75	-0.75	+1.75	-1.25	+1.75	-1.25	+1.75	-1.25	+1.75	-1.75	+1.75	-1.75	+1.75	-1.75	+1.50	-1.75
+2.00	+2.00	-0.75	+2.00	-0.75	+2.00	-1.25	+2.00	-1.25	+2.00	-1.25	+2.00	-1.75	+2.00	-1.75	+2.00	-1.75	+1.75	-1.75
+2.25	+2.25	-0.75	+2.25	-0.75	+2.25	-1.25	+2.25	-1.25	+2.25	-1.25	+2.25	-1.75	+2.25	-1.75	+2.25	-1.75	+1.75	-1.75
+2.50	+2.50	-0.75	+2.50	-0.75	+2.50	-1.25	+2.50	-1.25	+2.50	-1.25	+2.50	-1.75	+2.50	-1.75	+2.50	-1.75	+2.25	-1.75
+2.75	+2.75	-0.75	+2.75	-0.75	+2.75	-1.25	+2.75	-1.25	+2.75	-1.25	+2.75	-1.75	+2.75	-1.75	+2.75	-1.75	+2.50	-1.75
+3.00	+3.00	-0.75	+3.00	-0.75	+3.00	-1.25	+3.00	-1.25	+3.00	-1.25	+3.00	-1.75	+3.00	-1.75	+3.00	-1.75	+2.75	-1.75
+3.25	+3.25	-0.75	+3.25	-0.75	+3.25	-1.25	+3.25	-1.25	+3.25	-1.25	+3.25	-1.75	+3.25	-1.75	+3.25	-1.75	+3.00	-1.75
+3.50	+3.50	-0.75	+3.50	-0.75	+3.50	-1.25	+3.50	-1.25	+3.50	-1.25	+3.50	-1.75	+3.50	-1.75	+3.50	-1.75	+3.25	-1.75
+3.75	+3.75	-0.75	+3.75	-0.75	+3.75	-1.25	+3.75	-1.25	+3.75	-1.25	+3.75	-1.75	+3.75	-1.75	+3.75	-1.75	+3.50	-1.75
+4.00	+4.00	-0.75	+4.00	-0.75	+4.00	-1.25	+4.00	-1.25	+4.00	-1.25	+4.00	-1.75	+4.00	-1.75	+4.00	-1.75	+3.75	-1.75

