

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

432431

**СИСТЕЙН®**  
**УЛЬТРА**  
**МОНОДОЗЫ**  
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 2108



8012



**ОПИСАНИЕ**

Систейн® Ультра монодозы средство офтальмологическое - стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль 0,4%, пропиленгликоль 0,3%, гидроксипропилгуар 0,16%-0,19%, кислоту борную 0,7%, калия хлорид 0,12%, натрия хлорид 0,1%, сорбитол 1,4%, 2-амино-2-метилпропанол 0,57%, кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения pH), воду очищенную (до объема 100%).

**ПОКАЗАНИЯ**

Систейн® Ультра монодозы средство офтальмологическое обеспечивает временное облегчение симптомов синдрома «сухого глаза», таких как чувство жжения и раздражение.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам Систейн® Ультра монодозы средство офтальмологическое.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Систейн® Ультра монодозы средство офтальмологическое может применяться по мере необходимости на протяжении дня.

Может быть использовано до и после ношения контактных линз. Переверните тюбик-капельницу с монодозой, закапайте в глаз и поморгайте.

Опустошите тюбик-капельницу после использования.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Не прикасайтесь к кончику тюбик-капельницы, так как это может привести к загрязнению раствора.

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ**

Безопасность и эффективность применения во время беременности и лактации не исследовались. Возможно применение при беременности и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

**ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ**

Не рекомендуется применение в детском возрасте до 18 лет, так как безопасность и эффективность применения у детей не установлены.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции по применению. При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

- При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного на упаковке.
- Не использовать раствор, если упаковка вскрыта или повреждена.
- Только для однократового использования! Оставшийся в тюбик-капельнице раствор не подлежит повторному использованию. Не храните раствор в открытой тюбик-капельнице.

**ФОРМА ВЫПУСКА**

Систейн® Ультра монодозы средство офтальмологическое выпускается в одноразовых стерильных пластиковых тюбик-капельницах (упаковывается в стрипы по 4 тюбик-капельницы или более).

STERILE A

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

"Алкон Лабораториз Инк.", США, Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, TX, 76134-2099, USA.

**Место производства:**

Франция  
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ/импортер:  
ООО "Алкон Фармацевтика".  
Адрес ООО "Алкон Фармацевтика" и принятия претензий:  
125315, Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.  
Тел. +7(495)961-13-33.

© 2017 Novartis



www.systane.ru

432431

**RA APPROVAL**

The undersigned:

name .....

confirms that this proof contains an accurate translation of the English Corporate Standard text, and is in compliance with the registered information and the legal rules. Please also carefully check:

- local barcodes if any
- formula
- components if mentioned
- shelflife if mentioned
- storage conditions
- trademarks

**This proof is approved:**

as is

conditionally

**Customer request:**

new proof

**Signature and date:**

NOTICE SYSTANE ULTRA 50 RUSSIA (CIS)	432431	Insert R/V 135x174 mm	CHECKED AND COMPARED WITH VERSION OF _____	<input type="checkbox"/> FILM / <input type="checkbox"/> BAT CONTROLLED AND APPROVED BY
/mm	BLEU BANQUISE	3rd proof 24/03/2017	Name _____ Date _____	Name _____ Date _____
■ 1/1 BLACK	■ DIELINE	KB SPEC.: 110801 v1 PRODUCTION LINE(S): MUM 1		

historique:  
08-2011: 110801 v1-creation

